

Legierung	Wachsgewicht in g													
	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	3,0	4,0	5,0	
Jenador 11	3,6	7,1	10,7	14,2	17,7	21,3	24,8	28,4	31,9	35,5	53,1	70,8	88,5	
Jenador 1	3,3	6,6	9,8	13,1	16,4	19,7	23,0	26,2	29,5	32,8	49,2	65,6	82,0	
Jenador 1P	3,1	6,2	9,4	12,5	15,6	18,7	21,8	25,0	28,1	31,2	46,8	62,4	78,0	
Jenador 1N	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,4	26,7	30,0	33,4	50,1	66,8	83,5	
Jenador 1U	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,4	26,7	30,0	33,4	50,1	66,8	83,5	
Jenador 31	3,1	6,2	9,4	12,5	15,6	18,7	21,8	25,0	28,1	31,2	46,8	62,4	78,0	
Jenador 41	2,7	5,5	8,2	11,0	13,7	16,4	19,2	21,9	24,7	27,4	41,1	54,8	68,5	
Jenador 51	2,6	5,2	7,7	10,3	12,8	15,4	18,0	20,5	23,1	25,6	38,4	51,2	64,0	
Jenador 71	2,2	4,3	6,4	8,5	10,6	12,8	14,9	17,0	19,1	21,2	31,8	42,4	53,0	
Jenadent 1G	3,9	7,7	11,6	15,4	19,3	23,2	27,0	30,9	34,7	38,6	57,9	77,2	96,5	
Jenadent 11	3,8	7,6	11,4	15,2	18,9	22,7	26,5	30,3	34,1	37,8	56,7	75,6	94,5	
Jenadent 21	3,7	7,4	11,2	14,9	18,6	22,3	26,0	29,8	33,5	37,2	55,8	74,4	93,0	
Jenadent 4	2,8	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,5	22,2	25,0	27,8	41,7	55,6	69,5	
Jenadent B	2,3	4,6	6,8	9,1	11,4	13,7	16,0	18,2	20,5	22,8	34,2	45,6	57,0	
Jenadent C	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23,0	34,5	46,0	57,5	
Jenadent D	2,3	4,6	7,0	9,3	11,6	13,9	16,2	18,6	20,9	23,2	34,8	46,4	58,0	
Jenapall M	2,1	4,2	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9	21,0	31,5	42,0	52,5	

Wiederverkäufer:

Gegenanzeigen und Hinweise:

Bei Verdacht einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Bestandteile einer Legierung soll ein Verträglichkeitstest (Speicheltest, dermatologische Untersuchung u.ä.) durchgeführt werden. Der Hersteller garantiert durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe und durch sorgfältige Verarbeitung eine hohe Reinheit seiner Produkte, die bei jeder Produktions-Charge kontrolliert wird.

Bei Kontakten zu Zahnersatz aus Legierungen, die nicht artgleich sind, können elektrochemisch bedingte, örtliche Empfindungsstörungen auftreten. Sollten diese auch nach Kontrolle der Unterfüllungen fortauern, müssen andere Werkstoffe angewendet werden.

m&k dental Jena
Spezielle Dental-Produkte

Hersteller:
Bauer-Walser AG
Bunsenstr. 4-6 • 75210 Keltern
Fon: 07 23 6 | 704-0
Fax: 07 23 6 | 704-270
info@bauer-walser.net
www.bauer-walser.net

Vertrieb:
m&k gmbh
Im Camisch 49 • 07768 Kahla
Fon: 03 64 24 | 811-0
Fax: 03 64 24 | 811-21
mail@mk-webseite.de
www.mk-webseite.de

CE 0123

Dokument-Nr.: QMF-0521
Titel: Broschüre Legierungen / Lote
Änderungsstand: g
Änderungsdatum: 01.10.2019

Dentallegierungen




m&k dental Jena
Spezielle Dental-Produkte

Weitere Geschäftsfelder der m&k gmbh:

Bereich Dental

Zahnmedizinische Präzisionsteile sind eine wesentliche Grundlage für exakte Funktion und höchste Ästhetik einer prothetischen Versorgung. Die Produktpalette konzentriert sich auf die innovativen dentalen Implantatsysteme **Trias** und **ix2**. Feinmechanische Konstruktionselemente für diese Implantatsysteme und auch für die konventionelle Prothetik wie Geschiebe, Riegel, Anker etc. runden das Angebot für vielfältige, patientenfreundliche Zahnersatzlösungen ab.

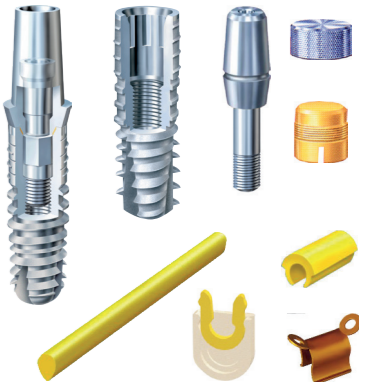


Aktuelle Informationen erhalten Sie bei der „Shared Implantology GmbH“:

03 94 01 | 63 89 60
www.shared-implantology.gmbh



Bereich Industriealbzzeuge

Die Lieferung hochreiner Edelmetalle für Forschungsaufgaben oder zur Beschichtung von elektronischen Bauteilen gehört ebenso zum Lieferprogramm wie Platinschalen unterschiedlicher Form und Legierung sowie Halbzeuge für den Schmuckbedarf.

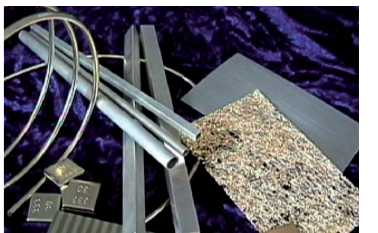


Aktuelle Informationen unter:

03 64 24 | 811-28
www.mk-edelmetall.de

Bereich Edelmetallhandel / Recycling

Durch die eigene Edelmetallschmelze- und -Analyse ist die m&k gmbh in der Lage, flexibel und zeitnah, edelmetallhaltige Abfälle zu verarbeiten und zu vergüten.

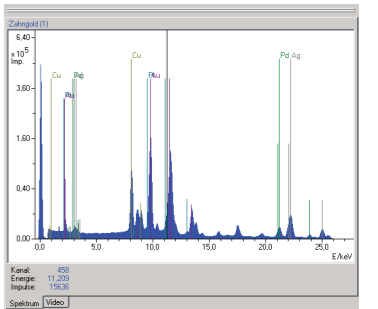

Der Handel mit Edelmetallen und die Metallkontenführung für alle interessierten Kundensicher ein Höchstmaß an individueller Partnerschaft. Das ist Service vom Altmaterial bis zum Fertigprodukt aus einer Hand.

Aktuelle Informationen unter:

03 64 24 | 811-62
www.mk-edelmetall.de ⇒ Edelmetallrecycling

m&k gmbh



